

Bella Ag



Surveillance automatique de la température des bovins



Qui est Bella Ag?

Bella Ag est une entreprise dédiée à l'amélioration de la santé animale par une technologie de fine pointe.

Comment pouvons-nous vous aider?

Le système Bella Ag vous permet de gérer la santé du troupeau en surveillant automatiquement la température de chaque individu ainsi que celle du troupeau.

Avantages

- Surveille automatiquement la température du troupeau.
- Détection des maladies tôt
- Améliore la détection d'oestrus (chaleur)
- Permet de traiter les animaux malades plus tôt pour un meilleur résultat au traitement
- Réduit les coûts de traitement avec des traitements administrés plus tôt
- Réduit les taux de mortalité
- Augmente les bénéfices

Comment fonctionne le système Bella Ag

C'est aussi simple que un, deux, trois!

- 1.** Le bolus Bella est administré par voie orale avec l'aide d'un fusil standard ball (lance capsule standard). Une fois ingéré, le bolus s'installe d'une façon permanente au fond du réticulum.
- 2.** Le lecteur Bella reçoit l'information du bolus Bella, c'est à dire l'identification de l'animal ainsi que sa température pour ensuite la transmettre au logiciel Bella.
- 3.** Le logiciel Bella recueille l'information envoyée par le lecteur et identifie automatiquement les animaux qui ont besoin d'attention, habituellement 3 jours avant que des problèmes de santé soient notables par observation ou par la prise de température rectale.



Produits Bella Ag



Bolus Bella

Notre bolus est conçu de façon à prendre des relevés de température régulièrement pour ensuite les transformer en sorte d'identité permanente de chaque individu.

- Spécifications

- 22 mm de diamètre, 64 mm de longueur
- Aimant en néodyme de 14 lbs de force de maintien pour la protection contre la détérioration du matériel
- 5 ans, espérance de vie de la pile
- Garantie 1 an du fabricant



Lecteur Bella

Nos lecteurs, compacts et légers, peuvent être installés loin du contact direct des animaux, les gardant ainsi à l'abri des dommages.

- Spécifications

- 12,2 cm de longueur, 9,6 cm de hauteur
- Chaque lecteur à une couverture de 20m
- Pile de secours rechargeable pour assurer la collecte des données même par panne de courant
- Conception robuste MIL-SPEC pour résister aux éléments
- (60 cm) fil d'antenne pour permettre un positionnement optimal
- Offert avec ou sans fils pour mieux répondre à vos besoins



Logiciel Bella Ag

S'installe facilement sur l'ordinateur et est compatible avec la plupart des logiciels de gestion de troupeau. Reçoit et analyse les informations via le lecteur et identifie automatiquement les animaux qui ont besoin d'attention.

- Spécifications

- Génère automatiquement les listes d'alerte
- SMS et alertes par courriel
- Surveille les vaches fraîches selon ce qui vous convient
- Permet de voir la température des bovins de plusieurs façons
- Retrace facilement les dates de traitement
- Permet d'afficher les événements du journal aux cotés des relevés de température.
- Compatible avec les gestion de troupeau les plus populaires

Configuration minimale requise:

- Windows® XP SP3 ou plus
- Système d'exploitation
- Intel® ou AMD® double cœur processeur
- 1 Go de RAM
- 5 Go Espace disque dur libre
- Lecteur CD / DVD-ROM
- Réseau local Connexion
- graphiques 256 Mo


Configuration recommandée:

- Windows® 7 32 bits avec les dernières Service Pack
- Intel® ou AMD® quad core processeur
- 3 Go de RAM
- 5 Go Espace disque dur libre
- Lecteur CD / DVD-ROM
- Réseau local Connexion
- Graphiques 512 Mo

Les échantillons de température


Oestrus

Les oestrus (chaleurs) sont habituellement représentés sur le graphique par une pointe unique de haute température. Dans la majorité des cas, cette haute température surviendra en pleine nuit. Ce qui rend les animaux prêts pour la saillie facilement identifiable.

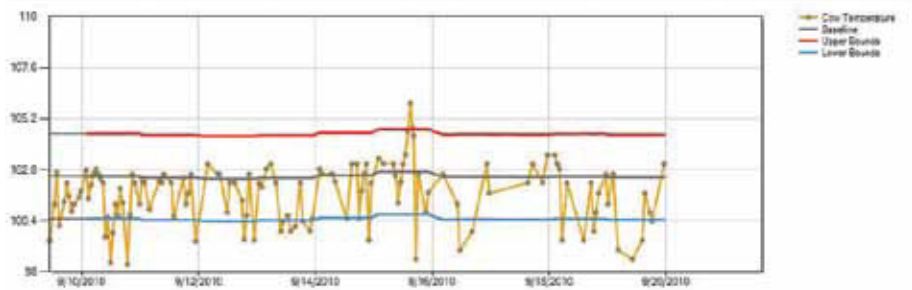

Pneumonie

Une pneumonie a plutôt tendance à être représentée par de grandes variations de température et même pendant quelques jours. Des courbes de température revenant à la normale, permettent de constater que le traitement est efficace.

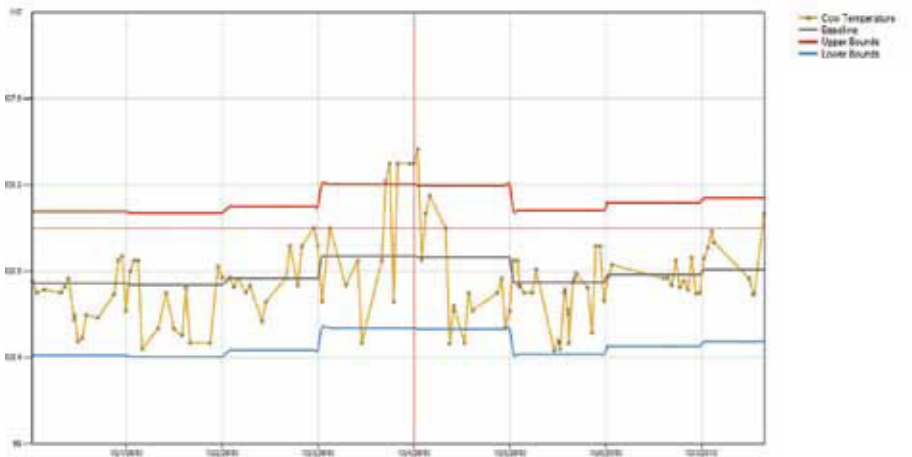

Ontario

1-866-849-3610

519-746-6150

Québec

1-888-849-3610

450-252-0344

info@dairycheq.com
www.dairycheq.com